

# SIEKALU SAVĀKŠANAS INSTRUKCIJA

- 1) Izņem siekalu trauciņu no iepakojuma.
- 2) Pieliec piltuvi pie mutes un spļauj iekšā līdz siekalas sasniedz zilo līniju.
- 3) Noskrūvē no trauciņa piltuvi un izmet to tam paredzētajā maisiņā.
- 4) Uzskrūvē trauciņam korķīti.
- 5) Apslauki stobriņu ar līdzī iedoto salvetīti.
- 6) Pēc tam uzlīmē stobriņam līdzī iedoto barkodu, uz kura ir tavs uzvārds un piešķirtais numurs.
- 7) Stobriņu ieliec maisiņā.



**MFD**

Veselības grupa